

Instructies mondmaskers

Vooraf...



1

Was het masker op 60 °C te allen tijden voor gebruik.



2

Was uw handen voordat u het masker opdoet.



3

Zorg ervoor dat u de juiste zijde van het masker gebruikt.



4

Plaats het masker achter uw oren. Raak alleen de elastieken aan de zijkant aan.



5

Zorg ervoor dat het masker zowel uw neus als mond bedekt.

Tijdens...



Zet het masker niet meer op wanneer u het eenmaal verwijderd heeft. Verwissel het dan meteen alstublieft.

Daarna...



1

Verwijder het masker door alleen de elastieken aan de zijkant aan te raken.



2

Was uw masker in een waszakje op 60 °C.



3

Was uw handen daarna, zonder uw gezicht aan te raken.



4

Was het masker op 60 °C voordat u het opnieuw gebruikt.

BETA

belangenvereniging
tankstations



VNPI